

# Hygiena

## PRO-Clean™

szybki test do wykrywania pozostałości protein

### opis produktu

Test PRO-Clean™ to szybki i łatwy sposób na dokładne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia powierzchni urządzeń medycznych pomagający zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i jakość wyrobów. Test PRO-Clean™ wykrywa wszelkie pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po myciu i dezynfekcji. Aby przeprowadzić badanie należy pobrać wymaz z powierzchni, dodać odczynnik, a w razie obecności pozostałości zawierających proteiny odczynnik zmieni barwę na fioletową. Stopień zmiany barwy oznacza poziom zanieczyszczenia powierzchni. Im większe zanieczyszczenie, tym szybciej następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest ciemniejszy. Test PRO-Clean™ natychmiastowo sprawdza czystość powierzchni, umożliwiając w razie potrzeby wdrożenie odpowiednich działań korygujących.

### podstawowe cechy i zalety

wyniki w czasie od 1 minuty,  
urządzenie typu „all-in-one” – bez oprzyrządowania,  
12-miesięczny okres przechowywania,  
łatwość interpretacji wyniku,  
przystępna cena,  
nadaje się doskonale do szkolenia pracowników i uzyskiwania informacji zwrotnych,  
zapewnia weryfikację wg HACCP/SSOP.

### sposób użycia i odczyt wyników


Należy we właściwy sposób, opisany w instrukcji, pobrać wymaz z badanej powierzchni. Następnie zatrzęsnać probówkę, przełamać górną fiolkę i ścisnąć ją palcami, żeby odczynnik spłynął na dno probówki, gdzie znajduje się próbnik z wymazem. Potrząsnąć fiolką. Odczytać wynik testu zgodnie z instrukcją.

### obszary zastosowań

PRO-clean to test idealny dla placówek medycznych, producentów żywności, Centralnych Sterylizatori, Bloków Operacyjnych i sal zabiegowych.



### odczyt wyników

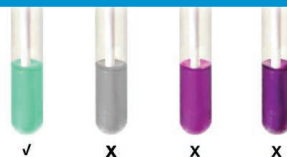

### przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w temp. 2 - 25°C.  
Okres przydatności:  
na opakowaniu zbiorczym.

### numer katalogowy i opakowanie

**ProClean** 100 szt./ opakowanie  
25 szt./ opakowanie